



Bacoban®DL 3 % – Desinfektion mit nachhaltiger Wirkung
(In Verbindung mit dem Vaporisator: bis zu 5 Tage getestet)
Geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180

Mikrobiologische Wirksamkeit	
DIN EN 1040	5 min.
DIN EN 1275	5 min.
DIN EN 1276	5 min.
DIN EN 1650	5 min.
DIN EN 13697	5 min.
DIN EN 14476: 2005	Adenovirus 2% 240 min.
DIN EN 14476: 2005	Rotavirus 0,1% 5 min.
DIN EN 14476: 2007-2	Norovirus 2% 240 min.

Bacoban® DL 3 %
wirkt gegen:
Bakterien, bestimmte Viren (Hepatitis B und C Viren, Influenzavirus einschließlich H5N1 und H1N1, Rotavirus, Adenovirus und Novovirus) und Pilze

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten: Benzalkoniumchlorid 0,78 g, Natriumylritrion 0,075 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

Verwendungszweck:
Gebrauchsfertige Desinfektionslösung zur Verwendung in Verbindung mit Adexano Vernebelungsgerät, antimikrobieller Langzeit-Effekt. Formaldehydfrei, phenolfrei

Wirksamkeit und Anwendung:
Prüfung gemäß DGHM-Richtlinie (hohe organ. Belastung):
1,0 %; 5 min.; 0,75 %, 15 min.

Prüfung gemäß EN-Richtlinien:

DIN EN 1040:	5 min.	
DIN EN 1275:	5 min.	
DIN EN 1276:	5 min.	
DIN EN 1650:	5 min.	
DIN EN 13697:	5 min.	
DIN EN 14476:	2005	Adenovirus 2% 240 min.
DIN EN 14476:	2005	Rotavirus 0,1% 5 min.
DIN EN 14476:	2007-2	Norovirus 2% 240 min.

Prüfung gemäß DVM-Richtlinie:
begrenzt viruzide Wirksamkeit: 5 min.
Antimikrobieller Effekt bis zu 5 Tage gegen Bakterien (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis...), **Pilze** (Aspergillus niger, Candida albicans), **Viren** (HIV, Hepatitis B und C, Herpes, Grippe, BVDV, H5N1). Geprüft nach dem international anerkannten **ASTM E2180 Test**. Geprüfte Biokompatibilität (Verträglichkeit) nach DIN EN ISO 10993-1.

Gebrauch nur in Verbindung mit Adexano® Vernebelungsmaschine:

Bacoban®DL 3 % Flaschenverschluss entfernen, sorgfältig und fest mit dem Innengewinde des Diffusoraufsatzes der Adexano® Vernebelungsmaschine verschrauben. Beachten Sie für den Desinfektionsvorgang die **mitgelieferte Bedienungsanleitung** zur Adexano® Vernebelungsmaschine

Sicherheitshinweis:
Während der Desinfektion mit Adexano Vernebelungsgerät nicht im selben Raum aufhalten, Fenster und Türen verschlossen halten. Nicht verschlucken oder einatmen. Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten gründlich mit Wasser spülen und Arzt kontaktieren. Von Kindern fernhalten.

Kann auf allen Oberflächen verwendet werden. Bei empfindlichen Oberflächen empfehlen wir eine Beständigkeitsprüfung mit **Bacoban®DL 3 %** an einer unauffälligen Fläche. Aufbewahrung nur im geschlossenen Gefäß. Nur im vollständig entleerten Zustand kann das Behältnis dem Recycling zugeführt werden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Unter Beachtung der örtlichen und behördlichen Vorschriften einer geeigneten Entsorgung zuführen.

Wichtig! Die langanhaltende antimikrobielle Wirkung von **Bacoban®DL 3 %** darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Biozid Reg.Nr.: N-37828



Adexano Spezialprodukte für Gesundheit, Pflege und Prävention GmbH,
Bildstockerstraße12, D-66538 Neunkirchen, Tel. 0 68 21-9 12 77 60, www.adexano.com

Adexano

Vaporisator

Oberflächendesinfektion:

- gleichmäßig
- flächendeckend
- zuverlässig
- langanhaltend

Trockenvernebelung erzeugt keine Feuchtigkeit!



Wirksamkeit getestet und bestätigt.

- Ideal für:**
- Krankenhäuser
 - Kliniken
 - Arztpraxen
 - Labors
 - Krankenwagen
 - Rettungsdienste
 - Altenheime
 - Reha – Zentren
 - Thalassotherapiezentren
 - ...

Vaporisator

Der Bacoban® Vaporisator ist eine Vernebelungs-maschine, die um eine heizende und ionisierende Turbine das mit dem nachgewiesenen Langzeitschutz ausgestattete Desinfektionsmittel Bacoban® DL 3 % vernebelt.



Die Partikelgröße (im Durchschnitt 5µ) dieser wasserbasierten 3%-igen Fertiglösung setzt sich in Form eines dichtvernetzenden Trockennebels gleichmäßig auf jeden Quadratzentimeter des behandelten Raumes nieder.

Da hierbei keine Feuchtigkeit erzeugt wird, müssen auch keine empfindlichen Sachen/Gegenstände zur Seite geräumt werden.

Einfachste Anwendung:

- Den nur 5,8 kg schweren Vaporisator in den zu behandelnden Raum stellen.
- Bacoban DL 3 % in der 1000 ml Flasche einfach in den Aufsatz eindrehen,
- Raumvolumen ermitteln (L x B x H),
- das ermittelte Volumen mittels Wählschalter einstellen und
- Ein/Aus Schalter drücken.
- Raum verlassen.
- Gerät stellt sich automatisch ab.

Die Anwendung besteht aus 2 Schritten: Vernebelung + Einwirkzeit (kein Nachwischen erforderlich)

Dauer der Behandlung:

Die präventive Behandlung eines Raumes mit den Maßen:
Länge 4 m, Breite 5 m und Höhe 2,5 m (50 m³) benötigt demnach:

- Vernebelung = 9 Minuten
- Einwirkzeit = 30 Minuten
- Gesamtdauer pro Behandlung = 39 Minuten



Technische Daten Vaporisator

- Gewicht: 5,8 kg
- Elektroturbine: 1.100 Watt
- Drehzahl: 22.000 U/Minute
- Keine Flüssigkeitsspritzpumpe
- Vernebelung durch Venturi-Effekt bis zu 15 Meter vom Gerät
- Nebelaustrittsgeschwindigkeit: 80 m/s
- Automatische Abschaltung
- verzögerter Start
- selbstverlöschende Abdeckhaube
- 2 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte
- 0499 – Fertigung nach ISO 9001/ISO 13485

Desinfektionsmittel für Vaporisator



Stoppen Sie:

- Bakterien • bestimmte Viren • Pilze
- flächendeckend & nachhaltig!**

Wasserbasiertes Konzentrat Bacoban® WB



Alkoholfreie Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und anderen Flächen (gemäß Richtlinie 93/42/EWG; MDD)

VAH-gelistet

daraus abgeleitet

3 %ige gebrauchsfertige Lösung Bacoban® DL



Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und anderen Flächen (gemäß Richtlinie 93/42/EWG; MDD)

Geeignet für Bacoban® Vaporisator

Bacoban® DL 3 % - Desinfektion und Reinigung von medizinischen Flächen gemäß Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) und Oberflächen aller Art in Kliniken, Arztpraxen, Rehabilitations-einheiten und Altenheimen. Insbesondere in Bereichen, in denen eine effiziente und lang anhaltende Hygiene gefordert wird.

Auch besonders gut geeignet für Bereiche, in denen durch Mikroorganismen unangenehme Gerüche entstehen, wie Toilette und sanitäre Einrichtungen. Bacoban® DL 3 % kann auch in kritischen und sensiblen Bereichen der Pharma- und Kosmetik-industrie eingesetzt werden.

Warum ein Desinfektionsmittel mit nachhaltiger Wirkung?

Primäres Ziel war es, mit Bacoban® ein Flächendesinfektionsmittel zu schaffen, das nicht nur desinfiziert, sondern zusätzlich eine nachhaltige Wirkung bis zur nächsten Desinfektion garantiert. Dass nun eine **nachhaltige Wirkung** bis zu 10 Tagen, aus dem Vorhaben wurde, hat nicht nur uns, sondern auch unabhängige Prüflabors und Bacoban® testende Gesundheitseinrichtungen sehr überrascht.

Konsequenz aus diesen einzigartigen Ergebnissen ist es nicht, automatisch Hygienepläne zu ändern und nur noch alle 5 oder 10 Tage zu desinfizieren, sondern vielmehr diesen großen Vorteil zum Wohle der Patienten,

des Personals und zur Verbesserung der Infektionskontrolle zu nutzen.

Eingebaut in den etablierten Desinfektionsplan, bietet solch ein Desinfektionsmittel eine höhere Sicherheit vor der Verbreitung von Keimen und Viren und somit zur Reduktion von Neuninfektionen. Es schließt die Hygieneleücke!

Und genau dafür wurde Bacoban® entwickelt: Um **ein Mehr an Sicherheit** zwischen den Desinfektionsschritten zu gewährleisten und dem Anwender ein neues Instrument zur Bekämpfung von Keimen und Viren in die Hand zu geben.